



# Vibrationsuhr

Erinnerungsuhren für richtige Toiletten- und Trinkmomente.

Bedienungsanleitung



## Aufladen

USB-Anschluss



Laden Sie die Uhr mit der USB-Verbindung über Ihren Computer oder Ihr iPad auf. Das Aufladen der Batterie von 0 auf 100% dauert etwa 45 Minuten.

Funktionstaste



Anzeigetaste

LED - Anzeige

## Die Verwendung der Uhr

Ihre Uhr hat 2 Tasten. verwenden Sie die **Anzeigetaste**, um durch das Menü zu navigieren. Mit der **Funktionstaste** können Sie Einstellungen vornehmen.

Das Menü.

Drücken Sie **die Anzeigetaste** mehrmals und Sie werden sehen:



1 x Drücken - Die Zeit.



4 x Drücken - CALO und die Anzahl der verbrannten Kalorien an diesem Tag.



2 x Drücken - Das Datum.



5 x Drücken - Die Strecke DIST , die an diesem Tag zurückgelegt wurde.



3 x Drücken - STEP und die Anzahl der Schritte an diesem Tag.



6 x Drücken - Der Status der Batterie. (100% ist voll)



### Zeit einstellen mit der Anzeigetaste

- Drücken Sie 1 x **kurz** und sobald Sie „0:00“ sehen,
- Drücken Sie 1 x **lang** um die Einstellung vorzunehmen.
- Sie können jetzt die Stunden einstellen.
- Drücken Sie 1 x **lang** und stellen Sie die Minuten ein.
- Drücken Sie 1 x **lang** und stellen Sie die Monat ein.
- Drücken Sie 1 x **lang** und stellen Sie die Tage ein.

Mit **der Funktionstaste** können Sie Einstellungen vornehmen:



### Alarm einstellen:

- Drücken Sie 1 x **kurz** und sobald Sie „AL“ sehen,
- Drücken Sie 1 x **lang** um die Einstellung vorzunehmen.
- Sie erhalten den **1. Alarm** mit 2 Streifen auf dem Display.
- Drücken Sie 1 x **lang** und die beide Streifen blinken.
- Drücken Sie 1 x **kurz** und „ON“ erscheint.
- Drücken Sie 1 x **lang** und die Einstellung zu bestätigen.
- Unmittelbar danach blinkt die Stundenanzeige auf dem Display.
- Drücken Sie 1 x **kurz** und stellen Sie die Zahl ein. Die linke Taste ist absteigend und die rechte Taste ist aufsteigend.
- Drücken Sie 1 x **lang** und die Einstellung zu bestätigen.
- Die Minuteneinstellung erfolgt in gleicher Weise.

Die Einstellung des verbleibenden Alarms erfolgt auf die gleiche Art und Weise. Sie können **15 Alarmmomente** einstellen.



### 12/24 Stunden Anzeige:

- Drücken Sie 2 x **kurz** und sobald Sie „24 - -“ sehen,
- Drücken Sie 1 x **lang** um die Einstellung vorzunehmen.
- Drücken Sie 1 x **kurz** und stellen Sie die Zahl ein.
- Drücken Sie 1 x **lang** und die Einstellung zu bestätigen.



### Bewegungsaktivierung:

- Drücken Sie 3 x **kurz** und sobald Sie „H - -“ sehen,
- Drücken Sie 1 x **lang** um die Einstellung vorzunehmen.
- Drücken Sie 1 x **kurz** und „ON“ erscheint.
- Drücken Sie 1 x **lang** und die Einstellung zu bestätigen.

Wenn die Funktion H eingeschaltet ist, können Sie die Zeit sehen, wenn Sie die Hand heben. Um Batteriekapazität zu sparen, ist es besser, diese Funktion auszuschalten.



### Wiederholungscoutdown:

- Drücken Sie 4 x **kurz** und sobald Sie „Cd - -“ sehen,
- Drücken Sie 1 x **lang** um die Einstellung vorzunehmen.
- Drücken Sie 1 x **kurz** um das Intervall einzustellen
- Drücken Sie 1 x **lang** und die Einstellung zu bestätigen.



## Kilometer/Meilen:

- Drücken Sie 5 x **kurz** und sobald Sie „Cd - -“ sehen,
- Drücken Sie 1 x **lang** um die Einstellung vorzunehmen.
- Drücken Sie 1 x **kurz** und „E“ erscheint für Meilen und „g“ erscheint für Kilometer.
- Drücken Sie 1 x **lang** und die Einstellung zu bestätigen.

## Tipp:

Laden Sie die Batterie wieder auf, bevor sie vollständig leer ist. Die Einstellung verschwindet, wenn der Akku leer ist.

## Spezifikation

Umfang	255 x 16 x 9,2 mm
Gewicht	25 gram
Display	LED
Aufladen	USB 5V
Batterie	Polymer lithium 50mAh
Standby-Zeit	7 Tage
Material Armband	Silikon
Garantie	1 Jahr
Wasserdichtes	Mass IP67, Spritzwasser geschützt! Der Benutzer kann sich beim Tragen die Hände waschen, aber die Uhr ist nicht zum Schwimmen und Tauchen geeignet.

Sehen Sie sich unser Video auf der Website an:

<https://www.urifoon.ch/erinnerungsuhr>



Die Uhr ist CE-zertifiziert, d.h., sie erfüllt die EU-Normen und schützt so den Verbraucher vor Produkten, die gefährlich oder gesundheitsgefährdend sein können.